

ZENICOR FLEX

ZENICOR FLEX

ZENICOR FLEX



Zenicor **FLEX**

Joustava menetelmä EKG:n
jatkuvaan rekisteröintiin
– tarraelektrodilla tai
johdollisilla elektrodeilla

Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

Mikä on Zenicor Flex?

Joustava menetelmä EKG:n jatkuvaan rekisteröintiin

Zenicor Flex on joustava ratkaisu, kun tarvitaan jatkuvaa ja perusteellista EKG:tä sekä älykästä rytmihäiriöiden tunnistamista. Zenicor Flexiä voidaan käyttää niin tapahtuma-EKG:nä että Holterina. Riippumatta siitä, käytätkö potilaallasi tarraelektrodia tai johdollisia elektrodeja, Zenicor Flex voidaan konfiguroida 1, 2 tai 3 kanavalle ja eri näytteenottotaajuuksille. Vain yksi laite tarvitaan eri valvontatarpeisiin ja konfigurointiin

ZENICOR FLEX

Mahdollisuus etätulkintaan omassa organisaatiossanne jolloin;

Lähetävä yksikkö

- Aloittaa rekisteröinnin
- Lataa tiedot analysoitavaksi
- Vastanottaa ja lataa raportin

Tulkitseva yksikkö

- Muokkaa ja analysoi EKG-tietoja
- Luo raportin lähettäjälle



Tekniset tiedot

- Akun kesto jopa 14 päivää* ja noin 1 tunnin nopea latausaika pidentää tutkimusaikaa
- Muistikapasiteetti jopa 4 Gb*

**konfiguraatiosta riippuvainen, lähde Bittum Biosignals Ltd.*

Pieni ja mukautuva


Zenikor Flex on erittäin helppokäyttöinen. Potilas voi esteettä tehdä päivittäisiä askareita, käydä suihkussa sekä urheilla. Zenicor Flex on vedenpitävä, kevyt ja mukautuva, mikä tekee sen käytöstä vaivatonta samalla tarjoten korkealaatuisia ja luotettavia EKG-tallenteita.

Fiksuja toimintoja sujuvaan tutkimiseen

- Zenicor Flexin dataa on helppo hallita Zenicor Viewissa, joka tarjoaa toimintoja EKG:n helppoon tulkintaan. EKG:n analyysi voidaan tehdä etänä, mikä mahdollistaa tutkimuksen aloittamisen missä tahansa yksikössä, jossa on etätulkinnan mahdollisuus tai yhteys paikalliseen erikoislääkäriin. Kaikki samassa järjestelmässä.
- Zenicor Flex käynnistyy automaattisesti ihokosketuksen yhteydessä ja sammuu automaattisesti tarpeen mukaan, se havaitsee ja analysoi myös tahdistimen toiminnan.
- Korkealaatuisen EKG-signaalin ja P-aaltokeskeisen tekniikan ansiosta rytmihäiriöt voidaan tallentaa ja analysoida helposti.



ZENICOR FLEX

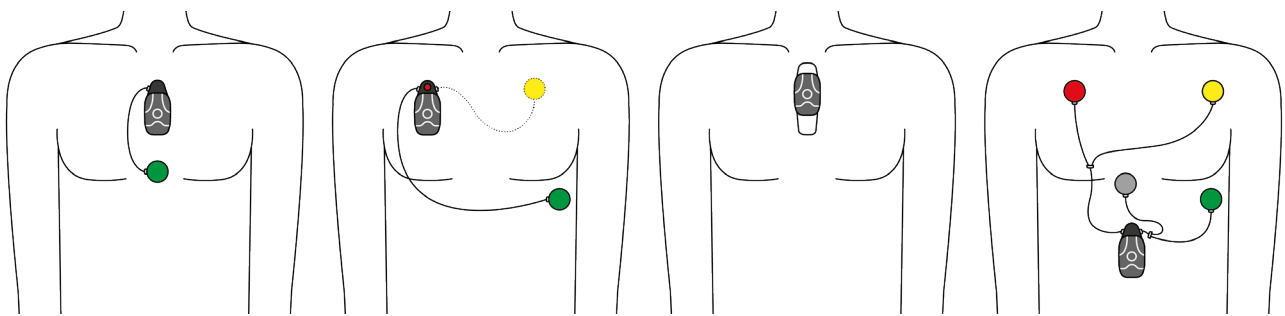

1 kanava - 2 elektroodia

1-2 kanavaa - 2/3 elektroodia

Tarraelektrodi 1-3 kanavaa

3 kanavaa - 5 elektroodia

Useita sijoitusvaihtoehtoja

Zenicor Flex voidaan sijoittaa useilla eri tavoilla, mittaus tapahtuu huomaamattomasti vaatteiden alla joko tavallisilla elektrodeilla tai tarraelektrodeilla OmegaSnap™ ja MiniSnap™.

- Näytteenottotaajuudet 125, 250, 500 ja 1000 Hz
- Vesitiivis, IP67
- Tahdistin-, QT- ja HRV-analyysi
- CE-luokka IIa

Zenitor Flex osa Zenitor-ratkaisua



Zenitor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.zenitor.se
info@zenitor.se

MM-229FI_rev01

Zenitor
MEDICAL SYSTEMS